

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A 6769-ES MODELLHEZ



plusOne CareTouch mell- és testvibrációs masszírozó

Karbantartás:

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

Tárolás:

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

Minőség:

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

Fontos utasítások:

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, a fény kigyullad, ha teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes töltés körülbelül 90 perc után érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon. Teljesen vízálló a kádban és a zuhany alatt való szórakozáshoz.

Figyelmeztetés:

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.

Bekapcsológomb:

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen a gombot a 10 beállítás közötti görgetéshez. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A plusOne Care Touch mell- és testvibrációs masszírozó készüléket úgy tervezték, hogy segítsen enyhíteni a görcsöket és elősegítse az egészséges szoptatást azáltal, hogy csökkenti a fájdalmat és felszabadítja a tejszatórnák dugulását az új anyák számára. Az ívelt végek célzott masszázst biztosítanak, míg az 5 rezgés- és 3 melegítési mód biztosítja, hogy minden lépésnél kényelmes legyen. A karcsú, ergonomikus formának köszönhetően a keze használata nélkül is ellazíthatja az izmokat és enyhítheti a kellemetlen érzést - csak helyezze a sima szilikonmasszírozót a szoptatós cí melltartójába.

Megszűnt a szoptatási vagy pumpálási kötelezettsége? Ez a sokoldalú masszírozó a terhesség előtt, alatt és után is használható teljes testmasszázs-ként - a stresszoldás, a jobb alvás és az általános jó közérzet elősegítése érdekében. Akár szoptat, akár szoptat, akár az izomgörcsök enyhítésére keres megoldást, a plusOne Care érintős masszírozó tökéletes kiegészítője a wellness-rutinjának.

FIGYELMEZTETÉS: Ha bármilyen kérdése van, használat előtt mindig forduljon orvosához. Az enyhe szappannal vagy tisztítókendővel történő tisztítás után a megszáradt készüléket helyezze a mellékelt tároló zsákba.

Hogyan kell használni a Pleasure Beast Pulse Stimulator Massager-t:



Készülj fel a bemelegítésre

Kezdje azzal, hogy behelyezi a készüléket a melltartójába, és beállítja a legalacsonyabb fűtési szintet, hogy tesztelje bőre érzékenységét. Szoptatás vagy szivattyúzás előtt hagyja a készüléket a melltartóban a kényelem érdekében.



Könnyebbé teszi a szoptatást és a pumpálást

Anyukák - ez nektek szól! Használja a masszírozó széles, ívelt végét a mellek és a test nagyobb területein. Finoman nyomja a mellhez, és mozogjon a mellbimbó felé, hogy elősegítse a tej áramlását és megelőzze a tejmirigyek elzáródását.



Céltott stimuláció

Használja a masszírozó speciálisan kialakított hegyeit a mellék és a test feszes területeinek intenzív masszírozásához és ellazításához.

Vezérlés:

1. Bekapcsológomb:

- A be-/kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.
- Nyomja meg a gombot az 5 rezgési mód közötti váltáshoz.

2. Fűtés gomb:

- A termék bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva a hőgombot 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz.
- A LED-lámpa addig pulzál, amíg a készülék melegszik, és akkor is égve marad, ha elérte a teljes hőfokot.
- Nyomja meg a fűtés gombot a 3 hőmérsékleti szint közötti váltáshoz.

A fájdalom és a görcsök enyhítése:

Állítsa be a hőt és a rezgést az igényeinek megfelelően, és alkalmazza a masszírozó széles ívelt fejét vagy célzott hegyeit az érintett területekre.

Töltőport:

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.

Hogyan kell feltölteni



1. a töltőérintkező egy kis fémgűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

Teljesen feltöltve akár 1,5 órán át is működhet.

Termék mérete: 7,29 cm × 12,7 cm × 4,17 cm

Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, ez károsíthatja a készüléket.



A csomag tartalma: plusOne CareTouch mell- és testvibrációs masszírozó, töltőkábel és használati utasítás.